

Bewegungsmelder Funk

Funktionsbeschreibung:

Der Protect Sense 2 ist ein akkubetriebener Funk- Bewegungsmelder für den Innenbereich. Wird eine Bewegung im Bereich des Sensors erkannt, sendet der Melder ein schaltverzögertes Funksignal an einen entsprechenden Empfänger. Wahlweise auf den Boden gestellt oder dank mitgeliefertem Halter an die Wand montiert, vielfältige Aufstellorte ermöglichen individuelle Erkennungs – und Auswertemöglichkeiten.

Der Bewegungsmelder kann schräg liegend (auch seitlich liegend) und stehend unter das Bett gelegt werden. Meistens werden die Bewegungsmelder unter das Bett am Fussende (Bettkante) schräg zum Nachttisch aufgestellt. Mit der mitgelieferten Halterung ist es möglich den Bewegungsmelder neben dem Bettgitter aufzuhängen, um Alarm zu geben, wenn ein Bewohner über das Bettgitter klettert.

Ein Beispiel ist auch eine Platzierung an der Türe, wenn ein Bewohner das Zimmer verlassen möchte.

Einsatzgebiet:

- Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen
- Demenzabteilungen, Kurzzeitpflege, Übergangs- und Langzeitpflege
- Krankenhäuser und Kliniken
- Psychiatrische Einrichtungen
- Betreute Wohneinrichtungen für Senioren
- Häusliche Pflege

Kundennutzen:

Erhöhte Sicherheit: Verbesserung der Kunden-/ Patientensituation durch frühzeitige Hilfestellung.

Freiräume erhalten/schaffen Sicherheit und Komfortgewinn für Patienten/ Bewohner bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit dank Funktechnik.

Praxispersonal entlasten Minimierung der Kontroll- und Beaufsichtigungsgänge.

Wirtschaftlichkeit steigern durch hochwertiges Produkt Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Qualität.

Kosten vermindern keine baulichen Maßnahmen erforderlich.

Hauptmerkmale:

- Bewegungsmelder mit Funk Alarmierungsfunktion
- robuste Ausführung
- Sensorreichweite ca. 8m
- hohe Einsatzdauer durch 1700mA/h Akku
- farbige LED für Alarm und Betriebsbereitschaft

Installation & Service:

- Boden und Wandmontage möglich
- Anschluss 230V AC, USB

Fragen von Kunden:

Ist der Protect Sense 2 ein Medizinprodukt?

Nein. Beim Protect Sense 2 handelt es sich um ein Peripherieprodukt, welches keinen direkten Personenkontakt hat.

Kann der Protect Sense 2 auch an Rufanlagen angeschlossen werden?

Ja, mit einem an ihre Rufanlage angepassten Funkempfänger oder direkt in alle Explorer Rufzentralen und Funkempfänger.

Verkaufsargumente:

- einfache und flexible Montage (Plug and Play)
- keine Planung und bauliche Maßnahmen erforderlich, sofort einsetzbar
- einfach und intuitiv bedienbar
- flexibel in seiner Funktion durch Verwendung verschiedenster Funkempfänger (Steckdoseneempfänger, Rufempfänger, Alarmempfänger, Rufzentralen ...)

ProtectSense2

