

Funk-Rufsystem Guard

Pflege-Transponder ESGZT

Funktionsbeschreibung

1. Bei Notruf-Sendungen innerhalb des HF-Empfangs blinkt die LED für 2 Sekunden. Die Meldung wird erst abgesetzt, wenn die LED (Beruhigungslicht) aufhört zu blinken. Einer erneute Notruf-Sendung ist erst dann wieder möglich, wenn die LED nicht mehr blinkt.
2. Sicherheit bei einem Unterbruch des HF-Empfangs: die Notruf-Auslösung des Ruftasters wird bis zu 8 Minuten alle 1,2 Sekunden wiederholt. Die rote LED zeigt dies durch kurzes Blinken alle 2 Sekunden an.
3. Das Auslesen der Version und Batteriekapazität ist mit Martin-Check nicht möglich.
4. Die ID des Wand-/Ruftasters ist auf 5xxx voreingestellt.
5. Einstellungen werden durch das Betätigen der Reset-Taste übernommen.
6. Batterie-Low-Meldung wird bei 30% Batteriekapazität nach einer Rufauslösung übermittelt.
7. Der Ruf kann direkt am Ruf-Abstelltaster an der grünen Taste quittiert werden, oder:



Quittierung durch den Pflege-Transponder

Drücken Sie kurz den Taster des Pflege-Transponders. Nun flackert die rote LED für 6 Sekunden. In dieser Zeit betätigen Sie den Taster des Wand-/Zugtasters. Das rote Flackern der LED des Pflege-Transponders endet sofort und leuchtet anschließend 6 Sekunden grün.

Gleichzeitig leuchtet nun die rote bzw. die rote und grüne LED des Wand-/Zugtasters für 3 Sekunden als Quittierungsbestätigung



Der **Personal-Transponder** funktioniert auf die selbe Weise.

Für jede Pflege-Transponder-Version gilt: Bei Quittierung wird immer zunächst der Tastendruck des Pflege-Transponders übermittelt. Nach erfolgter Quittierung übermittelt der Ruftaster die Quittierung.



Batteriewechsel

Auf der Rückseite des Zugtasters ist die Halterung für die CR2 Batterie.

Die Batterie hält ca. 1 Jahr *. Es kommt darauf an, wie oft er betätigt wird (kann bis 2 Jahre funktionieren) Es wird empfohlen, die Batterie aus Sicherheitsgründen vier Mal im Jahr, in regelmäßigen Zeitabständen, mit einem Batterietestgerät zu überprüfen. Das Auslesen Batteriekapazität ist mit Martin-Check nicht möglich.

**Die genannten Werte gehen immer von einer neuwertigen Qualitätsbatterie aus. Bitte keine No-Name- oder Billigbatterien verwenden.*

Daten

Abmessungen Elektronik (BxHxT)	51,0 mm x 43,0 mm x 20,5 mm
Abmessungen Montageplatte (BxHxT)	70,5 mm x 70,5 mm x 8,0 mm
Abmessungen Frontplatte (BxHxT)	60,0 mm x 60,0 mm x 8,0 mm
Batterie	CR2 / 3 V
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Alarmquittierung	Magnetkontakt / Pflege-Transponder oder auch Abstelltaster

